

Sterilisation von Wattekügelchen REFILL

Die ORBIS Cotton pellets Wattekügelchen bestehen aus 100% rein gebleichter, chlorfreier Baumwolle.

Da es sich bei dem Material um Baumwollgewebe handelt, kann ein Sterilisationsvorgang vorgenommen werden.

Die entsprechenden Sterilisationsparameter sind je nach Sterilisationsart einzuhalten. Bei der Verpackung der Wattekügelchen ist auf eine möglichst geringe Kontamination des Materials zu achten.

Bei konstanten Temperaturen variieren die Sterilisationszeiten abhängig von der Art des Mediums, ob der Gegenstand verpackt oder unverpackt ist, und dem Sterilisator Typ

Empfehlungen für die Sterilisation:

- 15 – 30 Minuten bei 121°C in einem Schwerkraftsterilisator (Dampfsterilisation) oder
- 4 Minuten bei 132°C in einem Vorvakuum-Sterilisator (Dampfsterilisation) oder EO (Ethylen Oxid) Sterilisation

Bitte beachten Sie:

Unsere Wattekügelchen sind mit dem Symbol „Nur zum Einmalgebrauch“ gekennzeichnet und nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen!

REF	Bezeichnung
314130	ORBIS Cotton Pellets Wattekügelchen Gr.XS 3mm 6x3g
314129	ORBIS Cotton Pellets Wattekügelchen Gr.S 4mm 6x3g
314128	ORBIS Cotton Pellets Wattekügelchen Gr.M 5,5mm 6x3g
314127	ORBIS Cotton Pellets Wattekügelchen Gr.L 7mm 6x3g



Mit freundlichen Grüßen

Ihr ORBIS-Dental Team