



ORBI-Sept Wipes Spendereimer rund

Produkt REF 046122

**Produktab-
bildung**



Aufbereitung Vor der ersten Nutzung und nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, um Hygienestandards einzuhalten.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Risse usw.).

Beim Umgang und der Aufbereitung der Spendersysteme sind folgende Punkte zu beachten, um ein Kontaminationsrisiko zu minimieren:

- Das Zurückschieben bereits entnommener Tücher oder das Auswringen des Desinfektionsmittels aus dem Tuch über dem Eimer ist zu vermeiden.
- Das Spendersystem muss aufbereitet werden, wenn die Tücher aufgebraucht sind, aber spätestens nach 28 Tagen.
- Die korrekte Aufbereitung der Spendersysteme ist zwingend zu berücksichtigen.

Der Spendereimer sollte thermisch (bei min. 65°C) desinfiziert werden. Die Aufbereitung ist in der Spülmaschine oder manuell unter gleichen hygienischen Bedingungen möglich.

Ist dies nicht möglich, muss der Spendereimer innen und außen mit einem frischen Desinfektionsmitteltuch wischdesinfiziert werden. Erst wenn der Spendereimer komplett getrocknet ist, kann er neu mit einer Rolle Tücher und dem Desinfektionsmittel angesetzt werden. Die maximale Standzeit des Spendersystems beträgt 28 Tage. Nach dieser Zeit ist ein vorhandener Restinhalt zwingend zu verwerfen.