



## ORBIS Sectional Matrix System - Ringe

### Produkt

REF 305802 - ORBIS Sectional Matrix system Ringe Universal schwarz 2St.

REF 305803 - ORBIS Sectional Matrix system Ringe Eng grau 2St.

REF 305804 - ORBIS Sectional Matrix system Ringe Universal und Eng 2St.

### Produktabbildung



### Eigenschaften

- 2 Varianten: Universal in schwarz, Eng in grau
- langlebig und elastisch
- hält den Keil fest an seinem Platz
- aus Nickel-Titan-Metall und Polyamid-Kunststoff
- innovatives Designs für längere Lebensdauer
- einfach zu montieren

### Aufbereitung Ringe

Die Ringe können in einen Desinfektor oder Ultraschallreiniger gelegt werden. Das Desinfektionsmittel für den Ultraschallreiniger sollte enzymatisch sein. Nach der Desinfektion kann das Produkt autoklaviert werden.

