

Produktinformation



ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus

Produkt REF 302695 - ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus 1L
REF 302696 - ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus 10L

**Produktab-
bildung**



**Zweck-
bestimmung**

Das Konzentrat erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie und ist ein Medizinprodukt für höchste Ansprüche an die Desinfektionsleistung und Materialverträglichkeit bei dem gesamten (inkl. chirurgischen) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis.

Eigenschaften

- Erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- Schon ab 1%iger Konzentration anwendbar
- Frei von Aldehyden und Phenolen
- Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten
- Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- Die Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar
- Das Gebinde ist recyclingfähig
- Das 1 Liter Gebinde kann für die Dosierung des Konzentrats verwendet werden

**Wirksamkeit
und
Einwirkzeiten**

ORBI-Sept Instrumentendesinfektion Plus wirkt **bakterizid** (einschließlich MRSA), **levurozid** (EN 13727/EN 13624) und wurde nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Stand: 04/2015) mit Kurzzeitwerten von 3% in 15 Minuten und 1% in 30 Minuten unter hoher organischer Belastung getestet. Wirkt **tuberkulozid** (M. terrae) in 3%iger Lösung in 15 Minuten und in 2%iger Lösung in 30 Minuten unter hoher organischer Belastung (EN14348). Wirkt **sporizid** in 1%/60 Minuten und 3%/30 Minuten (EN13704). Zur Listung bei der VAH gemeldet. **Vollständige Virusinaktivierung** (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/Covid19/HPV/Adeno/Polio) wird in einer 3%igen Lösung in 15 Minuten erreicht (EN14476). Wirksam gegenüber **Rota und Noro-Viren** in 3%/15 Minuten unter hoher organischer Belastung wirksam (EN 14476).

Hinweise

- Gebrauchte Lösung täglich erneuern (RKI-Empfehlungen). Bei sichtbarer Verschmutzung Lösung sofort erneuern.

Bestandteile 100 g Konzentrat enthalten: 8,0 g Benzalkoniumchlorid, 4,0 g Dodecyldipropylentriamin.

