

Produktinformation



ORBI-Sept Absauganlagenreiniger

Produkt REF 279734

**Produktab-
bildung**



**Art der
Anwendung**

Schaumarmes Konzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen incl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst.

**Hinweise zur
Anwendung**

Wöchentliche Anwendung:

Bei der regelmäßigen Anwendung des Reinigers werden einmal in der Woche 2 Liter einer gebrauchsfertigen Reinigungslösung (100 ml Konzentrat (2 x ½ Kappe) auf 1900 ml Wasser) durch die Saugschläuche geführt.

Akute Anwendung:

Bei Problemen mit der Absauganlage wird die gebrauchsfertige Reinigungslösung (2 Liter) mit 200 ml Konzentrat (4 x ½ Kappe) und 1800 ml Wasser angesetzt und durch die Saugschläuche geführt.

Nachbehandlung:

Es ist zwingend erforderlich, dass nach beiden Arten von Anwendungen, die Absauganlage mit mindestens 1 Liter Wasser nachgespült wird!

Hersteller



PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: 06251-866980-0

