

# Produktinformation




## ORBI-Wipes Spendereimer

**Produkt** REF 46122


**Produktab-  
bildung**




**Aufbereitung** Eine maschinelle chemo-thermische Aufbereitung bei max. 60°Grad ist möglich.  
Ansonsten reicht die Einhaltung der folgenden Schritte

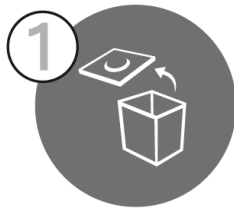

Spenderbox öffnen

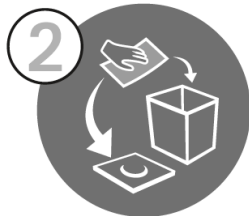

Deckel, Box, Reservoir mit getränktem Desinfektionstuch abwischen (Einwirkzeit beachten)

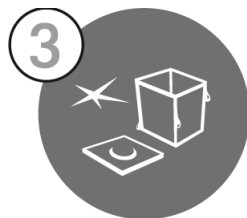

Trocknen lassen



Neuer Beutel mit Tüchern öffnen und in Box stellen

