

# Produktinformation



## ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat

Produkt REF 262556

Produktab-  
bildung



### Gemäß Biozid-Verordnung:

Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

### Gemäß MPG:

Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Hinweise zur  
Anwendung

Das Desinfektionsmittelkonzentrat wird vor seiner Anwendung zuerst mit Leitungswasser verdünnt. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden.

Einwirkzeiten  
(bezogen auf die  
Tränkflüssigkeit):

Wirksamkeit gegen	Konzentration / Einwirkzeit
Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung):	0,5% / 15 Min
Bakterien und Candida albicans nach VAH, EN 16615 (hohe Belastung):	3,0% / 15 Min. 1,0% / 60 Min
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI (hohe Belastung):	2,0% / 5 Min. 1,0% / 60 Min.
TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung):	1,0% / 60 Min.

Kennzeich-  
nung  
gemäß VO  
648/2004/EG

< 5 % nichtionische Tenside, 5-15%  
kationische Tenside. Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung):  
3,0% 2 min.  
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach (RKI)/DVV (mit Belastung): 2,0% 2 min.



# Produktinformation

**100g enthalten** 5,6g Didecyldimethylammoniumchlorid 3,1g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

**Dosiertabelle** Die Tabelle gibt das Mischverhältnis an: Menge Konzentrat (ml) : Menge Wasser (ml)

		Gewählte Menge fertige Desinfektionslösung				
		500 ml	1000 ml	1.500 ml	2.000 ml	2.500 ml
Gewählte Konzentration laut Einwirkzeiten	0,5 %	2,5 : 497,5	5 : 995	7,5 : 1.492,5	10 : 1.990	12,5 : 2.487,5
	1,0 %	5 : 495	10 : 990	15 : 1.485	20 : 1.980	25 : 2.475
	2,0 %	10 : 490	20 : 980	30 : 1.470	40 : 1.960	50 : 2.450
	3,0 %	15 : 485	30 : 970	45 : 1.455	60 : 1.940	75 : 2.425

**Hersteller**



PRISMAN GmbH  
Otto-Hahn-Ring 6-18  
64653 Lorsch  
Tel.: 06251-866980-0