



Reinigungsanleitung für ORBIS Präparatespender Artikelnummer 182211

Um den Spender zu reinigen, kann er wie folgt von der Wandplatte entnommen werden:

Verschlussplatte öffnen
und Flasche entnehmen.

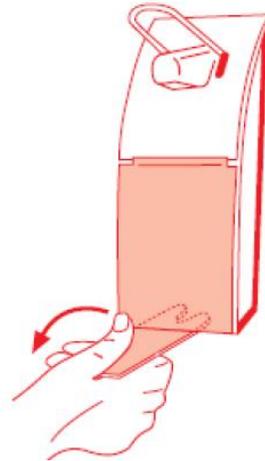

Entriegelungstaste drücken
und gleichzeitig Spender nach oben abziehen.

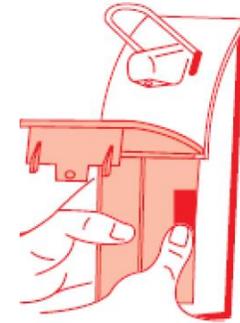

Die leere Kartusche ausspülen, anschließend mit etwas Wasser befüllen und die Pumpe zuerst damit durchspülen.

Danach etwas Desinfektionsmittel in die Kartusche einfüllen und durchpumpen.

Das Gehäuse kann mit Flächendesinfektionsmittel besprüht und nach vorgegebener Einwirkungszeit mit einem sauberen Wischtuch abgerieben werden.

Anschließend den Spender wieder einhängen und eine neue Kartusche einsetzen.

Der Vorgang sollte alle 1 – 2 Jahre wiederholt werden.