



Reinigungs- und Desinfektionsplan inklusive Hautschutzplan für Zahnarztpraxen

Was? Objekt, das aufbereitet/gewartet werden soll	Wie? Art der Aufbereitung/Wartung	Womit? Arbeitsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, DGHM/VAH-gelistet), Präparat, Dosierung, Einwirkzeit	Wann? Zeitpunkt, Rhythmus, Folge der hygienischen Maßnahmen	Wer? Name und Unterschrift der verantwortlichen Person
---	---	--	---	--

Instrumente				
 <p>Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische Maßnahmen, z. B. Abformlöfl, Trays (Kassetten, Tablett), Gläser, Absaugkanülen, abnehmbare Absaugkupplungen</p> <p>für chirurgische, parodontologische oder endodontische Maßnahmen, z. B. Spritzen, Zangen, Hebel</p>	<p>Die Aufbereitung erfolgt direkt nach der Behandlung unter Berücksichtigung der Risikobewertung und Einstufung der Medizinprodukte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontaminationsrisiko Transport zum Ort der Aufbereitung Entfernung grober organischer Verschmutzung mit Zellstoff Reinigung und Desinfektion <p>3.1 Nasschemisch: - Einlegen der Instrumente zerlegt bzw. Gelenke geöffnet, blasenfrei, von innen und außen bedeckt in eine Desinfektions- und Reinigungslösung (ggf. Ultraschallbad) - Reinigen, spülen nach Ablauf der Einwirkzeit unter fließendem Wasser, trocknen</p> <p>3.2 Maschinell: - Im Thermodesinfektor (RDG) gemäß Herstellerangaben reinigen, desinfizieren und ggf. manuell trocknen</p> <ol style="list-style-type: none"> Prüfung auf Sauberkeit, Unversehrtheit, ggf. Schritt 3 wiederholen Identifikation Pflege und Instandsetzung Funktionsprüfung Kenzeichnung (nach Erfordernis) Dampfsterilisation mit wirksamem, validiertem Verfahren Unkritische Instrumente*; Dampfsterilisation nicht erforderlich Semikritische Instrumente**; unverpackt auf Trays, Siebschalen, Tablett, Ständern, Schalen etc. Kritische Instrumente***; verpackt in Sterilgutverpackung nach DIN 58952/58953 bzw. EN 868 Dokumentierte Freigabe der Medizinprodukte zur Anwendung Kontaminationsgeschützte Lagerung 	<p>Manuelles Verfahren (nasschemisch) Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Maschinelles Verfahren Gerät:</p> <p>Programm:</p> <p>Sterilisation:</p> <p>Gerät:</p> <p>Programm:</p>	<p>täglich, je nach Grad der Verschmutzung auch mehrmals täglich</p> <p>nach jeder Behandlung</p> <p>Lagerdauer gemäß EN 868</p>	ZFA
 <p>Rotierende oder oszillierende Instrumente für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische Maßnahmen, z. B. Polierer, Bohrer, Fräser, Schleifer, Finierer</p> <p>für chirurgische, parodontologische oder endodontische Maßnahmen, z. B. Endodontie-/Parodontologieinstrumente und chirurgisch rotierende Instrumente</p>	<p>Die Aufbereitung erfolgt wie bei allgemeinen, chirurgischen, rotierenden Instrumenten (Schritt 3 und 9 gemäß Herstellerangaben).</p> <p>Außen: Reinigung und Wischdesinfektion Innen: Reinigung und Desinfektion</p> <p>Bitte beachten Sie speziell bei der Aufbereitung der Übertragungsinstrumente die Angaben der Hersteller und der regionalen Aufsichtsbehörden.</p> <p>Manuelle Aufbereitung: Innen- und Außenreinigung sowie Desinfektion</p> <p>Maschinelle Aufbereitung (sofern möglich): entsprechend den Herstellerangaben, z. B. im RDG, DAC Universal</p> <p>Pflege: Ölung der Innenteile</p>	<p>Manuelles Verfahren (nasschemisch) Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Maschinelles Verfahren Gerät:</p> <p>Programm:</p> <p>Produkt:</p>	<p>nach jeder Behandlung und nach Kontamination</p> <p>arbeitstäglich, zusätzlich bei Bedarf</p>	ZFA
 <p>Übertragungsinstrumente für allgemeine, präventive, restaurative, kieferorthopädische, chirurgische, parodontologische oder endodontische Maßnahmen, z. B. Turbine, Hand- und Winkelstücke</p> <p>Zusatzgeräte mit/ohne Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln, z. B. Zahnsteinentfernungsgeräte, Pulverstrahlgeräte, intraorale Kamera</p>	<p>Die Aufbereitung erfolgt wie bei allgemeinen, chirurgischen, rotierenden Instrumenten (Schritt 3 und 9 gemäß Herstellerangaben).</p> <p>Außen: Reinigung und Wischdesinfektion Innen: Reinigung und Desinfektion</p> <p>Bitte beachten Sie speziell bei der Aufbereitung der Übertragungsinstrumente die Angaben der Hersteller und der regionalen Aufsichtsbehörden.</p> <p>Manuelle Aufbereitung: Innen- und Außenreinigung sowie Desinfektion</p> <p>Maschinelle Aufbereitung (sofern möglich): entsprechend den Herstellerangaben, z. B. im RDG, DAC Universal</p> <p>Pflege: Ölung der Innenteile</p>	<p>Manuelles Verfahren (nasschemisch) Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Maschinelles Verfahren Gerät:</p> <p>Programm:</p> <p>Produkt:</p>	<p>nach jeder Behandlung und nach Kontamination</p> <p>arbeitstäglich, zusätzlich bei Bedarf</p>	ZFA

Flächen				
 <p>Flächen und Fußböden in Untersuchungs- und Behandlungsräumen, z. B. Behandlungseinheit, Geräte, Schränke</p>	<p>Fußböden mit der Flächen- und Wischdesinfektion (alkoholfrei oder bei alkoholischen Desinfektionsmitteln in gut gelüftetem Raum) im Scheuer-Wischdesinfektionsverfahren (mit geeigneter Nasswischmethode) reinigen und desinfizieren</p> <p>Kein Abspülen oder Trockenwischen vor Ablauf der Einwirkzeit; Wiederbenutzung der Flächen, sobald diese sichtbar trocken sind</p> <p>Bei der Verwendung von alkoholfreien Desinfektionsmitteln ist ein Nachwischen, nach der vollständigen Trocknung, mit sauberen Tüchern möglich.</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>arbeitstäglich (z. B. am Ende des Behandlungstages), zusätzlich bei Bedarf</p>	ZFA/Raumpflegepersonal
<p>Gegenstände und kleine Flächen, die kontaminiert wurden und nicht thermisch oder durch Einlegen in Lösungen desinfizierbar sind, z. B. Behandlungseinheit, Geräte, Arbeitsflächen, Röntgeneinrichtung, Leuchtgriff, intraorale Filmrollen</p>	<p>Kleinere Flächen mit der Sprüh- und Wischdesinfektion vornehmlich wischend reinigen und desinfizieren; Sprühdosisierung auf Bereiche beschränken, die durch Wischdesinfektion nicht erreichbar sind</p> <p>Auf vollständige Benetzung achten, Einwirkzeiten einhalten, trocknen lassen (z. B. Reinigung und Pflege des Behandlungsstuhls)</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>im Behandlungsbereich nach jeder Behandlung und nach Kontamination</p>	ZFA

Hautschutzplan				Haut & Hände
<p>Vorgeschrieben sind ein leicht erreichbarer Handwaschplatz mit fließend warmem und kaltem Wasser, Direktspender mit hautschonenden Waschmitteln, Händedesinfektionsmittel und geeignete Hautpflegeprodukte sowie Handschuhe zum einmaligen Gebrauch. An Händen und Unterarmen dürfen keine Schmuckstücke, Uhren, Ringe getragen werden.</p>				
 <p>Haut, bei Belastung durch wasseremulgierbare Arbeitsstoffe, z. B. Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Röntgen-Entwicklungschemikalien</p> <p>nicht wasseremulgierbare Arbeitsstoffe, z. B. organische Lösungsmittel, Waschbenzin</p> <p>Feuchtigkeitsstau und Hautaufweichung (Mazeration), z. B. beim Tragen von Handschuhen</p>	<p>Händereinigung: Unter fließendem Wasser mit hautschonender Flüssigseife aus einem Spender, abtrocknen mit Einmalhandtuch</p> <p>Hautschutz: Auf sorgfältiges Auftragen zwischen den Fingern, an den Nagelfalten und auf dem Handrücken achten</p> <p>Hautpflege: Auf sorgfältiges Auftragen zwischen den Fingern, an den Nagelfalten und auf dem Handrücken achten</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<ul style="list-style-type: none"> vor Arbeitsbeginn nach Arbeitsende bei sichtbarer Verschmutzung vor den Mahlzeiten nach jedem Toilettenbesuch nach Niesen, Naseputzen oder Husten 	<p>alle Beschäftigten</p> <p>alle Beschäftigten</p> <p>alle Beschäftigten</p> <p>alle Beschäftigten</p>
<p>Haut, bei nichtphysiologischer Besiedelung mit z. B. Bakterien, Pilzen, Viren</p>	<p>Hygienische Händedesinfektion: Händedesinfektionsmittel (z. B. gemäß Einreibeverfahren CENEN 1500) bis zur Auftrocknung, entsprechend den Herstellerangaben, auf der kompletten Hand verreiben. Hände müssen vor dem Anziehen der medizinischen Einmalhandschuhe lufttrocknen sein.</p> <p>Chirurgische Händedesinfektion: Hände und Unterarme bis zum Ellenbogen mind. 1 Minute gründlich waschen, auch Fingernägel und Nagelfalte beachten Hände und Unterarme vollständig durch Einreiben (z. B. gemäß Einreibeverfahren CENEN 1500) benetzen. Händedesinfektionsmittel dabei portionsweise zugeben, damit eine vollständige Benetzung gewährleistet ist und während der Einwirkzeit, entsprechend den Herstellerangaben, feucht gehalten wird. Hände müssen vor dem Anziehen der sterilen medizinischen Einmalhandschuhe lufttrocknen sein.</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p> <p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>vor jeder Behandlung, bei Behandlungsunterbrechung, bei Behandlungsende</p> <p>vor chirurgischer Behandlung und vor Behandlung von Patient*innen mit erhöhtem Infektionsrisiko</p>	<p>alle Beschäftigten</p> <p>Beteiligte an chirurgischer Behandlung und Beteiligte an Behandlungen von Patient*innen mit erhöhtem Infektionsrisiko</p>


Spezialbereiche				
 <p>Sauganlage (innen), Saugschläuche</p>	<p>Reinigen durch Durchsaugen eines Wasser-Luft-Gemisches, besonders wenn Blut abgesaugt wurde</p> <p>a) Reinigen, desinfizieren durch langsames Durchsaugen eines Gemisches aus Luft und Desinfektions-/Reinigungsmittellösung b) Zur Entfernung von Ablagerungen (Kalk, Verkeimungen, Salze aus Pulverstrahlgeräten)</p>	<p>kaltes Wasser (mind. 0,5 Liter)</p> <p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>nach jeder Behandlung</p> <p>a) 1- bis 2-mal täglich, mind. nach Arbeitsende b) 1- bis 2-mal wöchentlich, vor der Mittagspause</p>	ZFA
<p>Filter, Amalgamabscheider</p>	<p>Filterwechsel bzw. -reinigung nach Herstellervorschrift</p> <p>Wechsel/Entleerung des Auffangbehälters und Entsorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben</p>		<p>PSA benutzen bei Bedarf</p> <p>bei Bedarf</p>	
<p>Saugschläuche (außen) etc.</p>	<p>Reinigung und Desinfektion durch Wischen</p>	<p>Produkt(e):</p>	<p>nach jeder Behandlung</p>	ZFA
<p>Mundspülbecken</p>	<p>Reinigung und Desinfektion</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>1- bis 2-mal täglich, mind. nach Arbeitsende zusätzlich bei Bedarf</p>	ZFA
 <p>Abformungen z. B. Alginat, Silikon, Polyether-Gummi, Hydrokolloide, Polysulfide</p> <p>Werkstücke und Hilfsmittel z. B. Prothesen, Brücken, Gipsmodelle, Bissregistrat, Bisschablonen aus Wachs, Schellack oder Kunststoff sowie Artikulatoren, Okkludatoren, Fixatoren, Gesichtsbögen u. Ä.</p>	<p>Maschinelles Verfahren: Reinigung und Desinfektion nach Vorschrift des Herstellers</p> <p>Nasschemisches Verfahren: Reinigung und Desinfektion durch Einlegen in Lösung, nach Ablauf der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen, ggf. lufttrocknen</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>nach Entnahme aus dem Mund vor Transport in das Dentallabor nach Erhalt aus dem Dentallabor</p>	ZFA
<p>Gegenstände mit säurelöslichen Belägen z. B. Zement, Zahnstein, Oxidschichten, Flussmittelreste</p>	<p>Reinigung (z. B. im Ultraschallbad)</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>bei Bedarf</p>	ZFA
<p>Gegenstände mit Belägen aus Gips oder Alginat</p>	<p>Reinigung (z. B. im Ultraschallbad)</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>bei Bedarf</p>	ZFA
<p>Abfall Abfälle aus Behandlungs- und Untersuchungsräumen</p>	<p>Spitze, scharfe, zerbrechliche Gegenstände, Körperteile (z. B. Zähne, Gewebe), mit Blut, Sekreten kontaminierte Abfälle (z. B. Speichelzieher, Watterollen, Tupfer o. Ä.) sowie mit Erregern meldepflichtiger Erkrankungen behaftete Abfälle sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens in durchstichsicheren, reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen zu sammeln und ohne Umrüllen oder Sortieren in sicher verschlossenen Behältnissen der Entsorgung durch Verbrennung zuzuführen.</p> <p>Bleifolien, Altfilme, Fixierbilder, Entwickler, quecksilberhaltige Rückstände, Altmedikamente, Batterien werden von Entsorgungsbetrieben entsorgt.</p> <p>Hausmüllähnliche Abfälle werden in verschlossenen Abfallsäcken gesammelt und entsprechend den kommunalen Bestimmungen getrennt und entsorgt.</p>	<p>Produkt:</p> <p>Konzentration(en):</p> <p>Einwirkzeit(en):</p>	<p>bei Bedarf</p>	ZFA

Wasseraufbereitung				
 <p>Wasserführendes System</p>	<p>zur Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten</p>	<p>Produkt:</p>	<p>wird kontinuierlich und automatisch von der Behandlungseinheit dosiert</p>	ZFA
Sonstiges				
<p>Wäsche</p> <p>Arbeitskleidung</p> <p>Schutzkleidung, OP-Wäsche, OP-Bereichskleidung</p> <p>Orale Antisepsis</p>	<p>Kontaminierte Arbeitskleidung ist in ausreichend widerstandsfähigen und dichten Behältern/Säcken zu sammeln und durch thermische oder chemothermische Desinfektionsverfahren aufzubereiten.</p> <p>Schutzkleidung und OP-Textilien sind betriebsintern oder im Outsourcingverfahren mit einem akkreditierten Desinfektionswaschverfahren zu reinigen. OP-Wäsche ist anschließend mit einem geeigneten, validierten Verfahren zu sterilisieren.</p> <p>Spülung der Mundhöhle mit Antiseptikum</p>	<p>Fabrikat:</p> <p>Programm:</p> <p>Präparat:</p> <p>Dosierung:</p> <p>Sterilisation</p> <p>Gerät:</p> <p>Programm:</p> <p>Produkt</p>	<p>regelmäßiger Wechsel, nach Kontamination</p> <p>vor chirurgischen Eingriffen, bei Patient*innen mit erhöhtem Infektionsrisiko</p> <p>optional vor jeder Behandlung aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung</p>	<p>Praxis</p> <p>Patient*in</p>

Erstellt auf Basis der BGR 250 / TRBA 250, Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten (speziell Schutzhandschuhe, z. B. ORBI-Touch works, Chemikalienhandschuhe, Schürze und Schutzbrille). Die Verantwortung für die Umsetzung und korrekte Anwendung liegt bei der anwendenden Person.



Flächen

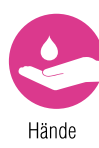

Hände



Instrumente



Geräte



Abformung



Absauganlagen



Bohrer



Wasseraufbereitung